


GEBRUIKSAANWIJZING DRUGSTEST DIPCARD

Met de drugstest van thuistestenkopen.nl detecteert u eenvoudig of er afbraakproducten van drugs in de urine zitten. Een dipcard bevat 1 of meerdere drugstestentesten. In het bovenste venster van de dipcard is de afkorting te zien van de drugs waarvoor de test bestemd is. Lees voor het gebruik van de test zorgvuldig deze handleiding door voor een betrouwbaar testresultaat en een juiste interpretatie van het testresultaat. Deze test is geschikt voor professioneel en thuisgebruik.

Testprocedure

1. De test en urine dienen op kamertemperatuur te zijn.
2. Vang wat urine op in een schoon bakje of bekertje.
3. Verwijder de dop van de dipcard en dompel de strip (s) in de urine met het pijluiteinde in de richting van de urine. Let op! De strip mag niet verder dan de MAX-streep ondergedompeld worden.
4. Houd de strip 10 - 15 seconden in de urine zodat strip voldoende urine bevat.
5. Leg de test op een vlakke niet-absorberende ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees tussen de 5 en 10 minuten het testresultaat af. Let op; wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 10 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.

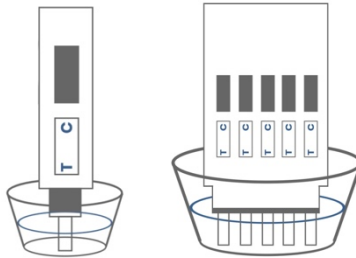


1. DOMPEL DE TEST IN DE URINE
Dompel de test niet verder dan de MAX-streep
10-15 SECONDEN
2. LEG DE TEST OP EEN VLAKKE ONDERGROND
3. LEES HET RESULTAAT NA 5 MINUTEN AF

Resultaat

Negatief: Er verschijnen 2 lijnen in het testvenster. Zowel de testlijn (T) en de controlelijn (C) zijn zichtbaar. Er is geen afbraakproduct van de geteste drugs gevonden in de urine. Let op: De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is negatief.

Positief: Er verschijnt alleen een controlelijn (C). De testlijn (T) verschijnt niet. Dit betekent dat de testpersoon een afbraakproduct van de desbetreffende drugs in zijn of haar urine heeft.

Ongeldig: Er verschijnt geen lijn in het controle(C) venster. Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Thuistestenkopen.nl.

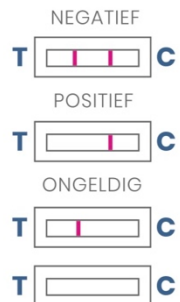

Verpakkingsinhoud

1. Een sigle dipcard of een multidrug dipcard
2. Droogmiddel
3. Bijsluiter

Benodigheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiter goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro gebruik
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken
4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.
9. De thuisstestkopen.nl drugstest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een kamertemperatuur tussen de 2 en 30 °C. Vries de test niet in.

Afkorting	Drugssoort / afbraakproduct	Hoelang aantoonbaar in de urine	Gevoeligheid
AMP	amfetamines / speed	1 - 4 dagen	1,000 ng / ml
COC	cocaine / benzoyllecgonine	2 - 5 dagen	300 ng / ml
MDMA	ecstasy (XTC)	1 - 4 dagen	500 ng / ml
MET	methamphetamines (meth, crystal meth)	1 - 4 dagen	1,000 ng / ml
OPI	opiaten / morfine / heroïne	1 - 4 dagen	2,000 ng / ml
THC	marihuana, hasj	7 - 30 dagen	50 ng / ml
BAR	barbituraten (slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen)	3 - 8 dagen	300 ng / ml
TCA	tricyclische antidepressiva (nortriptyline)	3 - 8 dagen	1,000 ng / ml
BZO	benzodiazepines (slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen)	3 dagen tot 6 weken	300 ng / ml
MOP	morfine	2 - 3 dagen	300 ng / ml

Factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewenning kunnen invloed hebben op het aantal dagen dat afbraakproducten van drugs aantoonbaar zijn in de urine. De drugstesten van thuisstestkopen.nl zijn zeer gevoelig waardoor een zeer kleine concentratie al te detecteren is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de thuisstestkopen.nl testen zeer betrouwbaar zijn.

Blijf in geval van een positief testresultaat kalm en probeer rationeel te denken en te handelen. Schakel eventueel de hulp in van de huisarts of een verslavingszorginstelling.

Betekenis symbolen

				
Deze verpakking bevat één test	Alleen voor in-vitro gebruik	Niet opnieuw gebruiken	Bewaren tussen de 2°C en 30°C	Buiten bereik van kinderen bewaren



THUISTESTENKOPEN.nl